

Behandlingskema for Photizo Vetcare hest

Problem	Akut	Kronisk	Behandling	Efterbehandling	Doser
Smerte	*		2 x pr. dag i 2-3 dage	1 x pr. dag i 10 dage	2
Smerte		*	1 x pr. dag	2-3 x pr. uge, indtil 3 uger	2
Seneskader	*		2 x pr. dag i 10 dage	2-3 x pr. uge	2/3
Sår	*		1 x pr. dag	Fortsættes til sammenvokset	1
Overbelastning		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	2-3 x pr. uge, indtil 3 uger - 1 x uge	2/3
Yver betændelse	*		1 x pr. dag i 5-7 dage	Til det er helet	2
Hudproblem		*	2-5 x pr. uge	2 x pr. uge - 1 x uge så længe der er beh	1
Led, fraktur	*		1 x pr. dag i 5-7 dage	3 x pr. uge indtil det er sammenvokset	2
Led, bruske		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	2 x 3 pr. uge - 2 uger - 1 x uge	2
Hermatomas/Hævelser	*		1 x pr. dag i 5-7 dage	Til det er helet	1/2
Efter operation	*		2 x pr. dag i 2-3 dage		1/2
Gigt		*	1 x 2-3 pr. uge	2-3 x uger indtil 2 uger - 1 x uge	2
Hofte dysplasi		*	2 x pr. dag i 10 dage	2-3 x uger indtil 2 uger - 1 x uge	2
Hot spot		*	2 x pr. dag i 10 dage	1 x uge så længe der er behov	1
Kissing spine		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	2-3 x uger indtil 2 uger - 1 x uge	2
Svamp, bakterier	*	*	1 x pr. dag	Til det er helet	1
Sur stråle	*	*	2 x pr. dag i 10 dage	Til det er helet	1/2

Behandlingskemaet skal anses som værende vejledende og er en indikator for hvordan du kan bruge din Photizo Vetcare på dit dyr.

Photizo er ikke en erstatning for dyrlæge eller andre medicinske procedurer eller behandlinger.

