

## Behandlingskema for hund (+7kg)

Problem	Akut	Kronisk	Behandling	Efterbehandling	Doser
Smerte	*		2 x pr. dag i 2-3 dage	1 x pr. dag i 10 dage	2-3 x doser pr. spot
Smerte		*	1 x pr. dag	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	3 x doser pr. spot
Seneskader	*		2 x pr. dag i 10 dage	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Sår	*		1 x pr. dag	Fortsættes til fuld heling	1 x dose pr. spot
Overbelastning		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Efter operation			1 x pr. dag i 5-7 dage	2-3 x pr. uge i 2 uger	1-2 x dose/doser pr. spot
Svampe Infektion	*	*	2-5 x pr. uge	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	2-3 x doser pr. spot
Eksem	*	*	1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag i 10 dage	2-3 x doser pr. spot
Hot spot		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	1 x dose pr. spot
Infektion i negl			1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	3 x doser pr. spot
Lymfeknuder	*	*	2 x pr. dag i 2-3 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	2-3 x doser pr. spot
Akupunktur punkter	*	*	1 x 2-3 pr. uge	Så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Knoglebrud	*		2 x pr. dag i 10 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Gigt		*	2 x pr. dag i 10 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Led		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Hæmatomer / blodøre	*		1 x pr. dag	Fortsættes til fuld heling	1 x dose pr. spot
Muskel skader	*		2 x pr. dag i 10 dage	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Muskel skader		*	1 x pr. dag	Fortsættes til fuld heling	2 x doser pr. spot



## Behandlingskema for hund (små dyr op til 7kg)

Problem	Akut	Kronisk	Behandling	Efterbehandling	Doser
Smerte	*		2 x pr. dag i 2-3 dage	1 x pr. dag i 10 dage	1-2 x doser pr. spot
Smerte		*	1 x pr. dag	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Seneskader	*		2 x pr. dag i 10 dage	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Sår	*		1 x pr. dag	Fortsættes til fuld heling	1 x dose pr. spot
Overbelastning		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Efter operation			1 x pr. dag i 5-7 dage	2-3 x pr. uge i 2 uger	1 x dose pr. spot
Svampe Infektion	*	*	2-5 x pr. uge	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Eksem	*	*	1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag i 10 dage	1-2 x doser pr. spot
Hot spot		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	1 x dose pr. spot
Infektion i negl			1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	2 x doser pr. spot
Lymfeknuder	*	*	2 x pr. dag i 2-3 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Akupunktur punkter	*	*	1 x 2-3 pr. uge	Så længe der er behov	1 x doser pr. spot
Knoglebrud	*		2 x pr. dag i 10 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Gigt		*	2 x pr. dag i 10 dage	1 x pr. dag, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Led		*	1 x pr. dag i 5-7 dage	1 x pr. dag, efter behov	1-2 x doser pr. spot
Hæmatomer / blodøre	*		1 x pr. dag	Fortsættes til fuld heling	1 x dose pr. spot
Muskel skader	*		2 x pr. dag i 10 dage	2-3 x pr. uge, så længe der er behov	1-2 x doser pr. spot
Muskel skader		*	1 x pr. dag	Fortsættes til fuld heling	1-2 x doser pr. spot

Behandlingskemaet skal anses som værende vejledende og er en indikator for hvordan du kan bruge din Photizo Vetcare på dit dyr.

Photizo er ikke en erstatning for dyrlæge eller andre medicinske procedurer eller behandlinger.

